

Dudas, Consultas?
0800-333-4272
Línea Evatest®



Personal capacitado atenderá
su consulta en forma
totalmente confidencial.

EVATEST

easy ♀

Test rápido
de embarazo

DIVISION
ELEA

Para hacer en cualquier momento del día en sólo 3 minutos



Laboratorio Elea Phoenix S.A. garantiza la calidad de las tiras reactivas **Evatest® Easy** contra todo defecto de fabricación. Con la presentación de esta garantía, el dispositivo en donde no se haya marcado el control de función (la línea de color en la ventana de control) y tras nuestra inspección, se reemplazará -sin cargo- la tira que muestre defectos de calidad. Esta garantía no cubre los defectos causados por el manejo inadecuado del producto o que se haya apartado de las instrucciones de uso.

Contenido del envase

La caja contiene en su interior:

- 1 envoltorio de aluminio cerrado herméticamente en cuyo interior hay 1 dispositivo para realizar 1 test y 1 sobrecito anti-humedad que no debe ser utilizado en el test.
- 1 manual de instrucciones.

El producto podrá ser utilizado una única vez debiendo ser descartado con posterioridad a su uso.

Bibliografía


1. Lenton, E.A., Neal, L.M., and Sulaiman, R.; Fertil. Steril.; Vol. 37, p. 773; 1982.
2. Armstrong, E.G., Ehrlich, P.H., Birken, S., Schlatterer, J.P., Siris, E., Hembree, W.C. and Canfield, R.E.; J. Clin. Endocrinol. Metab.; Vol. 59, p.867; 1984.
3. Batzer, F.R.; Fertil. Steril.; Vol. 34, p. 1; 1980.
4. Catt, K.J., Duran, M.L. and Vaitukaitis, J.L.; J. Clin. Endocrinol. Metab.; Vol. 40, p. 537; 1975.
5. Braunstein, G.D., Rasor, J., Danzer, H., Alder, D., and Wade, M.E.; Am. J. Obstet. Gynecol.; Vol. 126, p. 678; 1976.
6. Braunstein, G.D., Vaitukaitis, J.L., Carbone, P.P., Ross, G.T., and Wade, M.E.; Ann. Intem. Med.; Vol. 78, p. 39-45; 1973.
7. Bawood, M.Y., Saxena, B.B., and Landesman, R.; Am. J. Obstet. Gynecol.; Vol. 50, p. 172; 1977.
8. Galfre, G., Howe, S.C., Milstein, C., Butcher, G.W., and Howard, J.C.; Nature; Vol. 266; p. 550; 1977.

Fabricado en China. Elaborado por ABON BIOPHARM, Hangzhou Economic and Technical Development Area, Hangzhou, Zhejiang, PR, China.
Importado y Acondicionado por: Laboratorio Elea Phoenix S.A., Avda. Gral Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Bs. As.
Autorizado por La A.N.M.A.T. Certificado N°: 005601
Dir. Téc.: Alfredo J. Boccoardo, Farmacéutico.
506175-00 1-pm-g

Evatest® Easy

Evatest® Easy es un test de embarazo para ser realizado en forma privada, desde un día antes de la fecha estimada de menstruación y con la orina de cualquier momento del día (con una retención mínima de 3 hs.).

Laboratorio Elea, a través de **Evatest® Easy** le puede indicar en 3 minutos si está embarazada o no, con una total confiabilidad en su resultado.

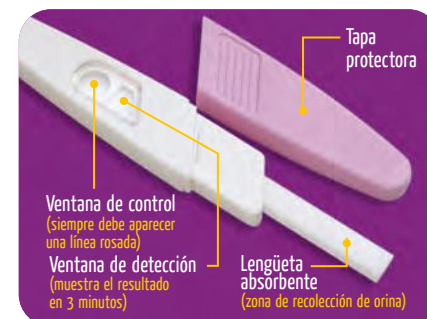

Descripción del test

La hCG (Gonadotropina Coriónica Humana) es una hormona segregada por la placenta poco tiempo después de ocurrida la fecundación. La aparición y el incremento rápido de la concentración de esta hormona en la orina de la madre, hacen de la β -hCG (subunidad β de la hCG) el indicador perfecto para la confirmación de la existencia del embarazo.

La avanzada tecnología de **Evatest® Easy** involucra la detección de la β -hCG en la orina mediante el uso de anticuerpos monoclonales marcados con sales de oro con un alto grado de sensibilidad y una total confiabilidad en su resultado.

No abrir el envoltorio que contiene el test antes de su uso.

Instrucciones de uso

Antes de abrir el envoltorio, lea detenidamente las instrucciones de uso. El producto debe estar a temperatura ambiente. Tenga un reloj disponible.



- Abra el envase y retire el dispositivo.
- Quite la tapa protectora y exponga la lengüeta absorbente.
- Para realizar el test, coloque la lengüeta hacia abajo.
- Sostenga la lengüeta directamente en el chorro de orina durante por lo menos 6 segundos, hasta que esté mojada.
Nota: a partir de este momento no coloque la lengüeta del dispositivo hacia arriba.

- Retire el dispositivo del chorro de orina, coloque nuevamente la tapa protectora.
- Mantenga siempre el extremo de color hacia abajo o coloque el dispositivo sobre una superficie plana con la ventana de control y la de detección hacia arriba.

- Deje el dispositivo en esta posición durante 3 minutos y luego lea el resultado.

NOTA: Una concentración baja de hCG podría dar lugar, después de un período de tiempo prolongado, a la aparición de una débil línea en la zona de detección, por lo tanto, no interprete el resultado luego de 10 minutos.

EVATEST

easy ♀

Test rápido
de embarazo

DIVISION
ELEA

Lectura del resultado

En la ventana de control debe aparecer siempre una línea rosada. Esto indica que el test se realizó correctamente y que el dispositivo funciona bien.

Ventana de detección (muestra el resultado en 3 minutos).

Ventana de control (siempre debe aparecer una línea rosada).



Resultado negativo

Una sola línea de color significa que Ud. no está embarazada. En la ventana de detección puede aparecer una tenue línea blanca por coloración del fondo, aún así el resultado sigue siendo negativo.



Resultado Negativo

Resultado positivo

Dos líneas de color significan que Ud. está embarazada (independientemente de la intensidad del color).



Resultado Positivo

Test inválido

La ausencia de la línea de color en la ventana de control indica que el test no ha sido realizado correctamente o que no se mantuvieron las condiciones apropiadas para la conservación del dispositivo.

Es necesario repetir el test con un nuevo dispositivo (ver garantía de calidad).



Test Inválido

Advertencias y precauciones

Ciertas condiciones médicas tales como quistes ováricos o embarazos ectópicos pueden llevar a resultados incorrectos.

Luego de un parto el test puede arrojar resultados positivos falsos.

La hCG también se encuentra aumentada en la enfermedad gestacional o trofoblástica.

La hCG puede tener niveles bajos durante los primeros días del embarazo y por lo tanto el test puede arrojar falsos resultados negativos.

En caso de sospechar un embarazo reciente, el test debería repetirse dos días después del primer resultado.

Especificaciones técnicas

Evatest® Easy es una tira reactiva basada en la tecnología GAIA (Gold Adsorbed Immuno Assay). Esta tecnología utiliza anticuerpos monoclonales, dirigidos contra la subunidad β -hCG, marcados con un coloide de oro. Estos anticuerpos se unen a la hCG y precipitan formando una línea coloreada.

- **Sensibilidad:** **Evatest® Easy** puede detectar niveles de β -hCG a partir de 25 UI/l, medida contra el 3er. estándar internacional de O.M.S.
- **Exactitud:** Superior al 99%.
- **Especificidad:** No tiene reacción cruzada con hLH (500 mUI/ml); FSH (1000 mUI/ml); TSH (1000 μ UI/ml).
- **Interferencias:** El test puede dar resultados positivos frente a la administración exógena de Gonadotropina Coriónica Humana y en algunos tipos de enfermedades no comunes. Consulte a su médico.
- **No tiene interferencias por:** Vitamina C; glucosa; proteínas; hemoglobina; aspirina; cafeína; ampicilinas y anticonceptivos orales.
- **Condiciones de conservación del producto:** Almacenar entre + 2 °C y + 30 °C. No congelar. El producto es estable hasta la fecha de vencimiento, siempre que el envoltorio de aluminio no haya sido abierto. No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Algunas preguntas y respuestas

- 1 **¿Cuándo se puede utilizar Evatest® Easy?**
La alta sensibilidad de **Evatest® Easy** permite detectar la hormona del embarazo en la orina, desde un día antes de la fecha estimada del período menstrual.
- 2 **¿Debe usarse la primera orina de la mañana?**
No necesariamente. La alta sensibilidad de **Evatest® Easy** permite efectuar el test con la orina de cualquier momento del día. Para favorecer la concentración de la β -hCG se recomienda una retención de orina de 3 hs. como mínimo.
- 3 **¿Cuál es la exactitud de Evatest® Easy?**
La exactitud de **Evatest® Easy** es superior al 99%.
- 4 **¿Es correcto el resultado si estoy tomando medicamentos?**
El uso de preparados hormonales conteniendo Gonadotropina Coriónica Humana, puede alterar el resultado. **Ante cualquier duda recomendamos consultar con su médico.** No se han detectado interferencias por el uso de otros medicamentos.
- 5 **¿El tomar alcohol afecta el resultado?**
No. La ingesta de bebidas alcohólicas no afecta el resultado.
- 6 **¿Qué debo hacer si mi test indica positivo?**
Consultar con su médico sin demoras.
- 7 **¿Puede ser confuso mi resultado?**
No. El test, realizado correctamente, es confiable. Las líneas en la zona de resultado son claras y definidas. En los casos de baja concentración de la hormona del embarazo, la línea de color en la zona de detección tendrá una coloración más suave, determinando de todos modos un resultado positivo. Un resultado positivo es siempre definitivo.

Frente a un resultado negativo obtenido dentro de la primera semana de atraso el test debería repetirse dentro de las 48-72 hs. con la primera orina de la mañana, debido a que algunas mujeres necesitan mayor tiempo para tener, en la orina, un nivel detectable de la hormona del embarazo.
- 8 **¿Cuánto tiempo permanecerá el resultado en la ventana antes de que desaparezca?**
Un resultado positivo no cambiará aunque el fondo puede oscurecerse. Por otro lado, en un resultado negativo puede aparecer, pasados los 10 minutos, una línea muy tenue en la ventana de detección. Esta línea se debe a un depósito de color y **NO es un resultado positivo.** Recuerde que **NO** se deben interpretar los resultados pasados los 10 minutos.
- 9 **¿De qué color son las líneas que aparecen en la ventana de control y la ventana de detección?**
El color de estas líneas puede ser desde ligeramente rosado a un púrpura oscuro dependiendo de la concentración de la hormona en su orina.
- 10 **La cantidad de líquido que ingiero ¿puede afectar mi resultado?**
La ingesta excesiva de líquidos puede diluir la orina haciendo que la concentración de hCG disminuya. Es aconsejable no modificar su ingesta normal de líquidos.

Ensayo orientativo para la autodetección de hCG, sin valor diagnóstico. Ante cualquier duda consulte a su médico.